

停電時の対応について

関係地域のお客様におかれましてはご不便なものと存じますが、当社製品をご使用されるにあたってのご注意を以下の通りご案内いたします。

1、停電時の対応について

停電して復帰した際、予期せぬ動作を起こすことを防止するために、以下の対応をお願いいたします。

① 電源プラグを備えた製品

メインスイッチ（電源スイッチ）を切り、コンセントから電源プラグを抜く。

② コンセント等機器等に隠れて電源プラグが抜けない製品

製品のメインスイッチ（電源スイッチ）を切る。

③ サービスコンセントを備えた製品(キャビネット類)

サービスコンセントに接続される全ての製品のメインスイッチ（電源スイッチ）を切り、サービスコンセントから電源プラグを抜く。

④ コンプレッサー、バキューム

コンプレッサー、バキュームの電源を切る、または分電盤のブレーカーを遮断（落とす）する。

停電復帰直後は、電力の供給が不安定となって製品が正常に作動しなくなる場合が想定されますので、動作に異常を感じられたら直ちにご使用を控えて下さい。

2、製品毎の注意事項について

① デンタルチェア

治療位置等の高い位置で停電した場合は、下降動作が出来なくなりますので、お客様にその状態で乗り降りいただく場合は、介添えして頂くなどお客様のお怪我や製品の転倒が無い様細心の注意を払う様お願いします。

② デンタルユニット

停電に至らずとも、電力の供給が不安定となって、ハンドピース類が正常に作動しなくなる場合が想定されますので、動作に異常を感じられたら直ちにご使用を控えて頂き、メインスイッチ（電源スイッチ）を切る様お願いします。

③ コンプレッサー、バキューム

電力の供給状態により、エア圧が不安定になった場合はハンドピース類が正常に作動しなくなる恐れがありますので、動作に異常を感じられたら直ちにご使用を控えて頂き、メインスイッチ（電源スイッチ）を切る様お願いします。

停電復帰後、製品をご使用になられる前に、ユニットエア圧と水圧が正常値であることをご確認下さい。万一正常値が出ない場合はコンプレッサーなどの異常が考えられますので、コンプレッサー本体の圧力もご確認下さい。

④ 歯科用洗浄器『速洗』

電力の供給が不安定となって、正常に作動しなくなる場合が想定されますので、動作に異常を感じられたら直ちにご使用を控えて頂き、メインスイッチ（電源スイッチ）を切る様お願いします。

万が一、洗浄途中で停電となり機械が停止した場合は、面倒でも最初から洗浄をやり直してください。

洗浄途中で停電となった場合、洗浄タンクに湯が残った状態で停止します。

電源が復帰された際、復帰と同時に排水ポンプが起動し、排水完了後、待機状態となります。再度、通常通りの洗浄開始の操作を行ってください。

なお、接続している給湯器については、給湯器メーカーの指示に従いお取り扱いいただきますよう、お願いします。

3、停電復旧時

ご使用される前に、取扱説明書の保守点検および始業前点検に従い点検を行い、少しでも異常を感じたら、使用せずに点検をご依頼下さい。

※本件に関するお問い合わせは、弊社営業所または下記までご連絡下さい。

タカラベルモント株式会社 デンタル事業部

大阪市中央区東心斎橋2-1-1

TEL:06-6212-3619 FAX:06-6212-3697

【修理・点検に関するお問合せ】

フリーダイヤル 0120-194-222