

# エスピーシエラ・エスピークレオ動作時の安全上のご注意


- チェア一動作時には、使用前に各部が正常かつ安全であり、周囲に障害物がない事を確認してください。
- チェア一動作時には、患者さん（特にお子さま）が、思わぬ事故を起こさない様に、図の ▼注意ポイントに気をつけて、目を離さないようにしてください。

▼レッグレスト屈折部での挟込注意  
シートとレッグレストの屈折部に手や足の指を入れないこと

▼シートとバックレスト部の挟込注意  
シートとバックレストの隙間に手や足を入れないこと

▼バックサポート支点部での巻込注意  
手摺金具とバックサポート回転支点部の隙間に指先を入れないこと  
※下記の注意ポイント拡大図参照

▼レッグレスト下部との挟込注意  
レッグレストの下に足を入れないこと

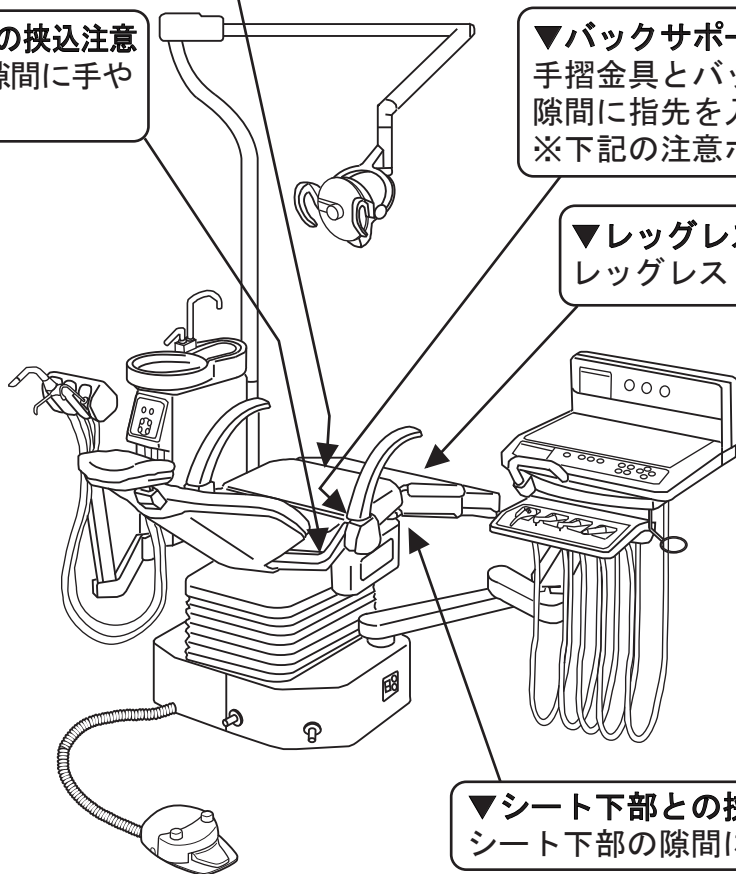

▼シート下部との挟込注意  
シート下部の隙間に手や足を入れないこと

## ☆注意ポイント拡大図

### ▼バックサポート支点部での巻込注意

右図A部の手摺金具とバックサポート回転支点部の隙間に指先を入れないこと  
(特にお子さまに注意)

