

## 製品安全性情報

### 【ベリックスNユニット テーブル動作時のご注意】

テーブルを上下させる場合は、ブレーキ開放ボタンで必ず解除してください。

当製品は、常にブレーキはかかっています。テーブルの上下動作時は、必ずブレーキ開放ボタンを押しながら行ってください。

上記のブレーキ開放ボタンを押さないで、テーブルを上下させ続けると、次の様な症状が起きる場合があります。

【ブレーキ開放ボタンを押さないと】


- ① テーブルの上下の動きが固くなる、または動かなくなります。
- ② テーブルを上下に動かす時に異音が出ます。
- ③ テーブルが傾く、またはガタつきます。
- ④ バランスアームのブレーキの利きが悪くなります。
- ⑤ バランスアームのヒンジが擦れ、バランスアームの関節部に金属粉が付着することがあります。(※関節部分)

以上のような状況で使用を続けると、テーブルが下ったり、または上がらないおそれがあります。

そのような時は、お近くのタカラベルモント(株)営業所または、総合サービスセンターにご連絡のほどお願い申し上げます。

お伺いして、製品の点検をさせていただきたいと思っております。また、点検結果によっては、バランスアームの交換を有償でお届けさせていただきます。

他旧タイプ(ベリックス)のメンブレンスイッチ

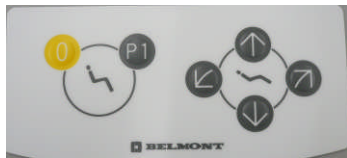

※関節部分

【ブレーキ開放ボタンの写真】



バランスアームブレーキ開放ボタン

