


製品安全情報

【デンタルライト ルシエ DL-720 ミラーカバーの取付時の注意について】

取扱説明書を参照の上、確実に取付を行ってください。

- ミラーカバーの取付後には取付状態の確認を行ってください。
ミラーカバーが確実に取付いていないと落下の恐れがあります。
- ミラーカバーストッパーを所定の位置に移動してください。
ミラーカバー取付後、ミラーカバーストッパーを所定の位置に移動し、ミラーカバー突起部がストッパーの右側にある事、およびストッパーによりミラーカバーが回転しない事を確認してください。
- 注意喚起シールについて
ミラーカバーストッパーの注意シールを用意しています。
ご要望されるお客様は、最寄りの営業所までご依頼ください。

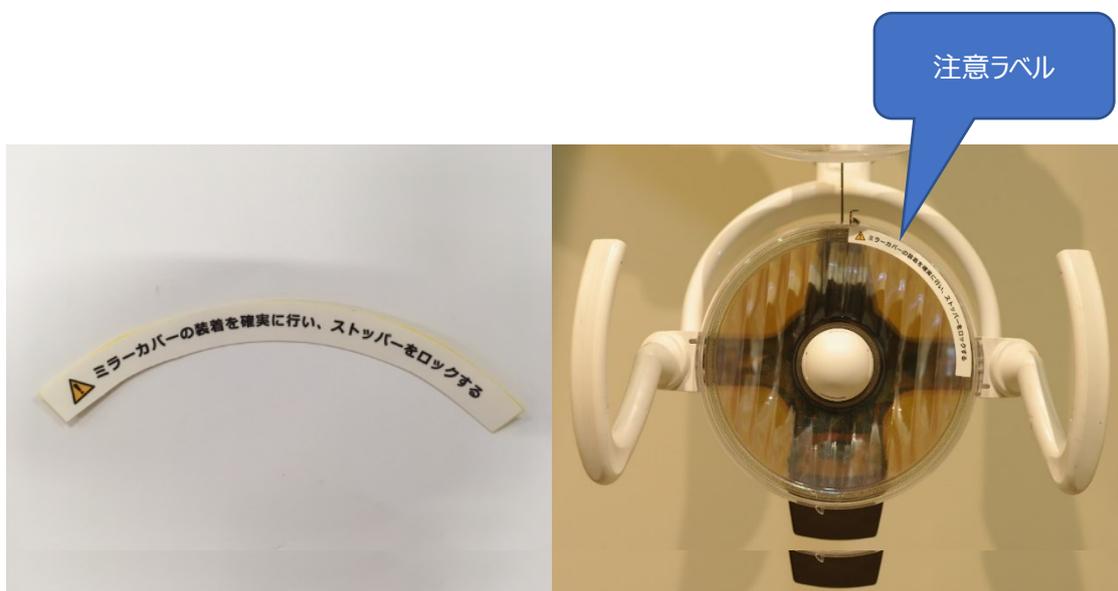



ミラーカバーの取付・取外し方法

⚠ 注意

- ・交換の際には必ずメインスイッチを○位置にしてください。やけど、感電のおそれがあります。（メインスイッチはユニット側にあります）
- ・使用直後は、ハロゲンランプ、ランプホルダー、ミラーカバーなどが熱くなっています。冷めてから交換を行ってください。やけどのおそれがあります。


■ミラーカバーの取外し方法

- ①ミラーカバーを少し手前に引き
- ②ミラーカバーストッパーを上げる。
- ③ミラーカバーは反時計方向に回すと、外れます。

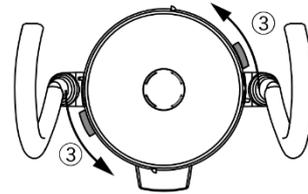
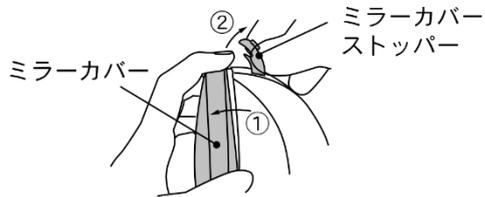


■ミラーカバーの取付方法

- ①ミラーカバーストッパーを上げたまま、ミラーカバーを時計方向に回します。
- ※ミラーカバーの爪部をハンドルの根元にある溝に最後まで入れます。

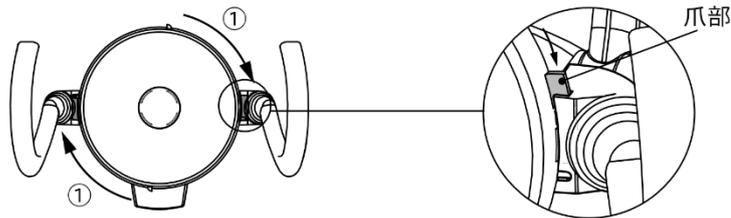

- ②ミラーカバーを少し手前に引き
 - ③ミラーカバーストッパーをおろします。
 - ④ミラーカバーを元に戻します。
- ※ミラーカバーストッパーの切り欠き部にミラーカバーがはまるようにしてください。

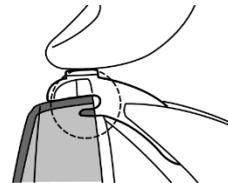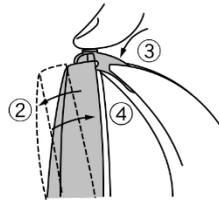

- ⑤取り付け状態を確認します。
- ※ミラーカバーの突起部が、正面向かってミラーカバーストッパーの右側にあることを確認してください。



⚠ 警告

ミラーカバーが確実に取り付けられていることを確認してください。ミラーカバーが確実に取り付けられていないと、落下のおそれがあります。