


# セレブチェア動作時の安全上のご注意

- チェア一動作時には、使用前に各部が正常かつ安全であり、周囲に障害物がない事を確認してください。
- チェア一可動部において、思わぬ事故が発生する恐れがあります。図の▼注意ポイントに気をつけて、チェア一動作時には、患者さん（特にお子さん）から目を離さないようにしてください。

▼バックレスト可動部との挟込注意  
バックレストとアームレストの隙間に  
手や足を入れないこと

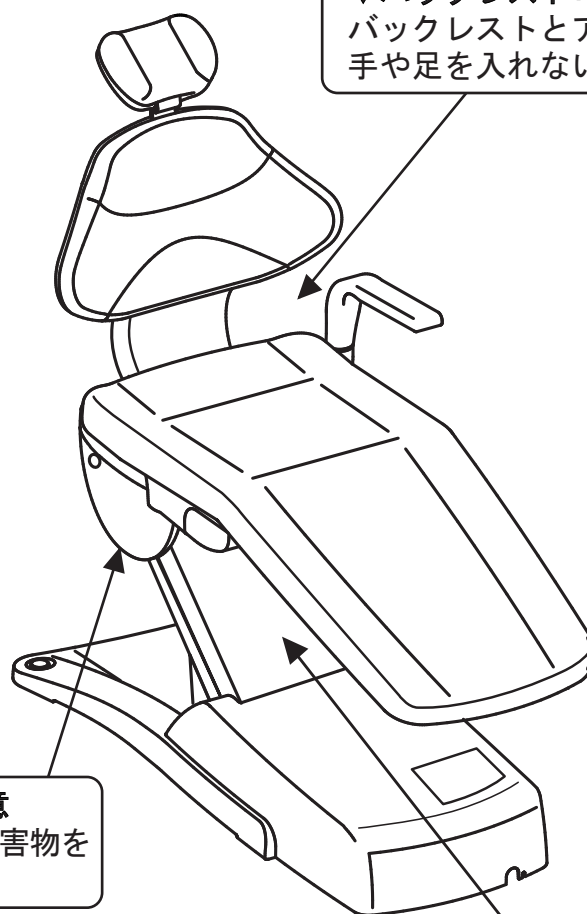

▼フランジカバーとの挟込注意  
フランジカバーの下に足や障害物を  
入れないこと

▼シート下部との挟込注意  
シート下部の隙間に手や足を  
入れないこと