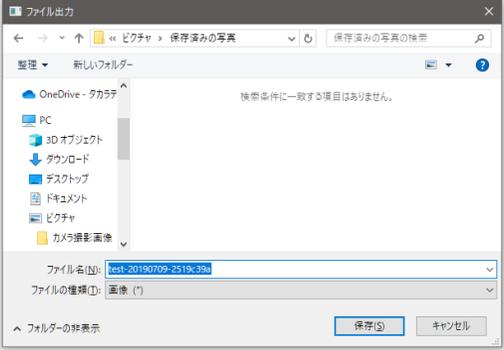
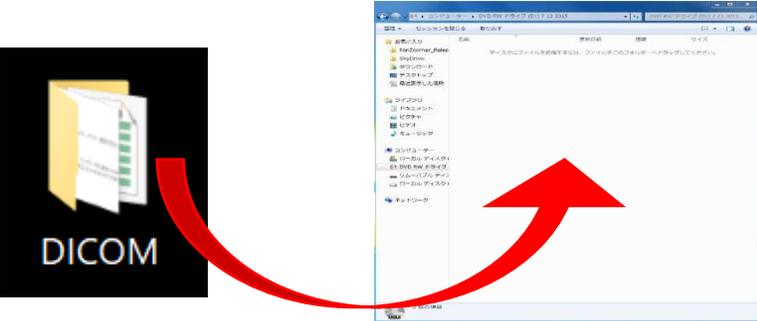


BEL-X DICOMデータの出力方法 (DICOMデータのみ)

<p>①</p>	<p>出力したいCT画像をMYGATE上でクリックし、プレビューを表示させた状態でファイルの出力をクリックします。</p>	
<p>②</p>	<p>出力したい場所、ファイル名を選択し、保存ボタンをクリックします。 ※ファイル形式はDICOMを選択してください。 ※ファイル形式にて「元の形式」を選択できますが、MyGate独自の形式です。</p>	
<p>③</p>	<p>USB、DVD等のメディアをパソコンに挿すとフォルダが表示されます。 DICOMはフォルダで出力されているので、フォルダごとドラック & ドロップで移動させてください。</p>	
<p>④</p>	<p>デスクトップ右下の  をクリックし、  をクリックします。 該当メディアをクリックし、安全に取り出します。 本手順を踏まず取り出すと故障やデータ破損の原因になりますのでご注意ください。</p>	