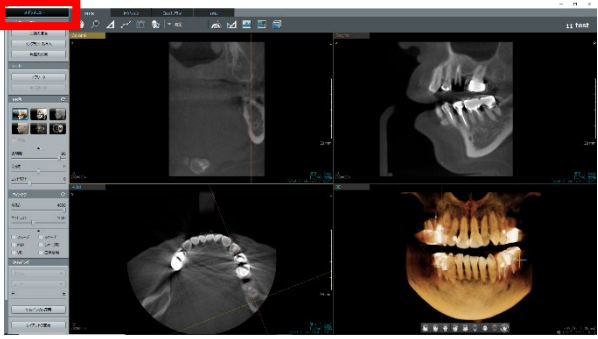
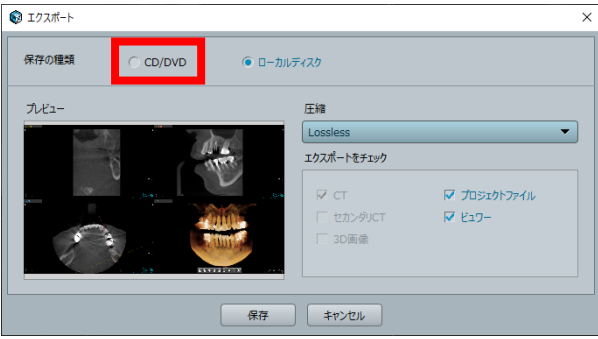
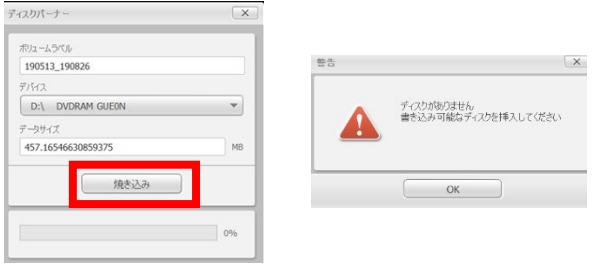


BEL-X DICOMデータの出力方法（簡易ビューワー付き/DVD・CDへ保存）

①	DVDをパソコンに挿入します。	
②	出力したいCT画像を開き、左上にある【メインメニュー】をクリックし【エクスポート】をクリックします。	
③	<p>保存の種類：CD/DVDを選択</p> <p>圧縮：基本的にLosslessを選択してください。（画質がかなり落ちてしまいます）</p> <p>エクスポートをチェック：簡易ビューワーを出力したい場合は必ず【ビューワー】に✓が入っていることを確認してください。</p> <p>最後に【保存】をクリックします。</p>	
④	<p>ディスクバーナーが表示されるので【焼き込み】をクリックします。</p> <p>DVDがうまく読み込めてない場合やDVDが入っていない場合は警告画面が表示されます。</p>	
⑤	焼き込みが完了すると右画面が表示されるのでOKボタンクリックで閉じ、完了です。	