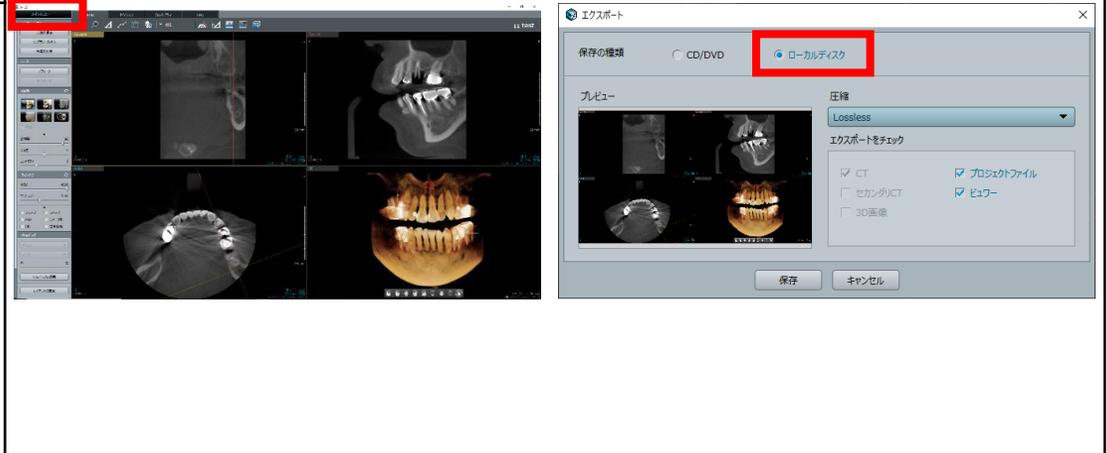
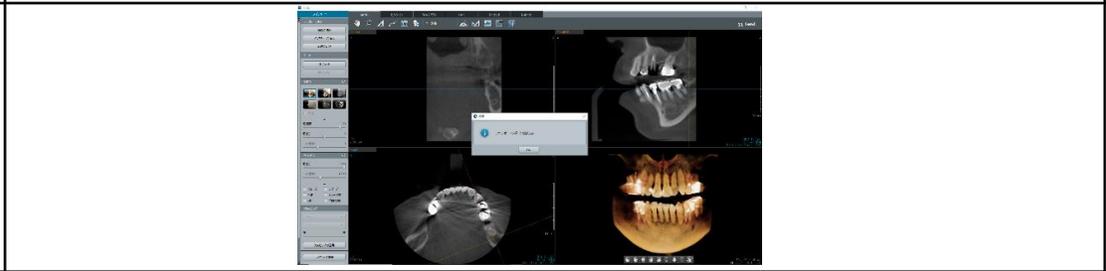
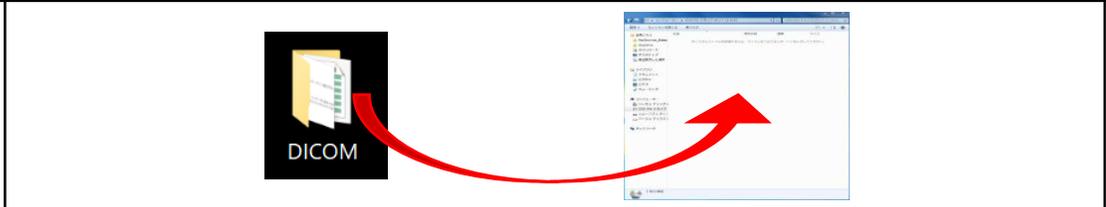


BEL-X DICOMデータの出力方法（簡易ビューワー付き/USB・SDカードへ保存）

<p>①</p>	<p>出力したいCT画像を開き、左上にある【メインメニュー】をクリックし【エクスポート】をクリックします。</p>	
<p>②</p>	<p>保存の種類：USB等に保存したい場合、ローカルディスクを選択し、任意の場所にフォルダを作成してください。</p> <p>圧縮：基本的にLosslessを選択してください。</p> <p>（画質がかなり落ちてしまいます）</p> <p>エクスポートをチェック：簡易ビューワーを出力したい場合は必ず【ビューワー】に✓が入っていることを確認してください。最後に【保存】をクリックします。</p>	
<p>③</p>	<p>待機画面が現れ、エクスポートが完了するとポップアップ画面が表示されるので【OK】をクリックし閉じます。</p>	
<p>④</p>	<p>USB/SDカードをパソコンに挿すとフォルダが表示されます。先ほど任意の場所に出力されているので、フォルダごとドラック & ドロップで移動させてください。</p>	
<p>⑤</p>	<p>パソコン右下の [スタート] をクリックし、 [USB] をクリックします。該当USBをクリックし、安全にUSBを取り出します。本手順を踏まずUSBを抜くと、故障やデータ破損の原因になりますのでご注意ください。</p>	