

BEL-X X-i3D簡易ビューワー(SimpleViewer)の開き方

<p>①</p>	<p>DVDをパソコンに挿入し「SimpleViewerLauncher」をダブルクリックで起動させてください。 自動で開かない場合は、DVD内のファイル「SimpleViewerLauncher.exe」をダブルクリックし、実行してください。</p> <hr/> <p>パソコンのスペックにより上記方法で開かない場合がございます。その場合「Simple Viewer Original」を選択してください。</p> <p>※初回起動時のみMicrosoft Visual C++が自動インストールされる場合があります。</p> <p>※読みまでに数分かかる場合があります。</p> <p>それでも開かない場合、「Simple Viewer Lite」を選択してください。</p> <p>※途中で表示される画面内の選択肢は「Next」→「はい (Y)」→「Install」→「Finish」と選択してください。</p> <p>※初回起動時のみビューワーソフト (Ez 3 DPlus)のインストールが必要になります。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名前</th> <th>更新日時</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CT</td><td>2021/02/04 17:27</td><td>ファイル フォルダー</td></tr> <tr><td>platforms</td><td>2021/02/04 17:27</td><td>ファイル フォルダー</td></tr> <tr><td>Resource</td><td>2021/02/04 17:27</td><td>ファイル フォルダー</td></tr> <tr><td>SimpleViewerLite</td><td>2021/02/04 17:27</td><td>ファイル フォルダー</td></tr> <tr><td>SimpleViewerOrg</td><td>2021/02/04 17:27</td><td>ファイル フォルダー</td></tr> <tr><td>autorun.inf</td><td>2018/09/17 18:43</td><td>セットアップ情報</td></tr> <tr><td>msvcpl140.dll</td><td>2018/09/17 18:43</td><td>アプリケーション拡張</td></tr> <tr><td>Qt5Core.dll</td><td>2017/02/10 18:48</td><td>アプリケーション拡張</td></tr> <tr><td>Qt5Gui.dll</td><td>2017/02/10 18:50</td><td>アプリケーション拡張</td></tr> <tr><td>Qt5Widgets.dll</td><td>2017/02/10 18:51</td><td>アプリケーション拡張</td></tr> <tr><td>ReadMe - CTビュー-開き方-.txt</td><td>2021/01/28 15:44</td><td>テキストドキュメント</td></tr> <tr><td>SimpleViewerLauncher.exe</td><td>2018/09/17 19:31</td><td>アプリケーション</td></tr> <tr><td>vcruntime140.dll</td><td>2018/09/17 18:43</td><td>アプリケーション拡張</td></tr> </tbody> </table>  <p><参考：対応スペック></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ O S : Windows 7 64bit / Windows 8 64bit / Windows 10 64bit ・ C P U : Intel Core 2 DUO以上 ・ メモリ : 4GB以上 ・ H D D : 20GB以上 ・ グラフィック : NVIDIA GeForce GT720以上 ・ グラフィックメモリ : 1GB以上  <p><参考：対応スペック></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ O S : Windows XP (SP1) / Windows Vista 32bit / Windows 7 32bit ・ C P U : Intel Core DUO 1.9GHz以上 ・ メモリ : 2GB以上 ・ H D D : 2GB以上の空き容量 ・ グラフィック : NVIDIA GeForce GT720以上 ・ グラフィックメモリ : 1GB以上 	名前	更新日時	種類	CT	2021/02/04 17:27	ファイル フォルダー	platforms	2021/02/04 17:27	ファイル フォルダー	Resource	2021/02/04 17:27	ファイル フォルダー	SimpleViewerLite	2021/02/04 17:27	ファイル フォルダー	SimpleViewerOrg	2021/02/04 17:27	ファイル フォルダー	autorun.inf	2018/09/17 18:43	セットアップ情報	msvcpl140.dll	2018/09/17 18:43	アプリケーション拡張	Qt5Core.dll	2017/02/10 18:48	アプリケーション拡張	Qt5Gui.dll	2017/02/10 18:50	アプリケーション拡張	Qt5Widgets.dll	2017/02/10 18:51	アプリケーション拡張	ReadMe - CTビュー-開き方-.txt	2021/01/28 15:44	テキストドキュメント	SimpleViewerLauncher.exe	2018/09/17 19:31	アプリケーション	vcruntime140.dll	2018/09/17 18:43	アプリケーション拡張
名前	更新日時	種類																																										
CT	2021/02/04 17:27	ファイル フォルダー																																										
platforms	2021/02/04 17:27	ファイル フォルダー																																										
Resource	2021/02/04 17:27	ファイル フォルダー																																										
SimpleViewerLite	2021/02/04 17:27	ファイル フォルダー																																										
SimpleViewerOrg	2021/02/04 17:27	ファイル フォルダー																																										
autorun.inf	2018/09/17 18:43	セットアップ情報																																										
msvcpl140.dll	2018/09/17 18:43	アプリケーション拡張																																										
Qt5Core.dll	2017/02/10 18:48	アプリケーション拡張																																										
Qt5Gui.dll	2017/02/10 18:50	アプリケーション拡張																																										
Qt5Widgets.dll	2017/02/10 18:51	アプリケーション拡張																																										
ReadMe - CTビュー-開き方-.txt	2021/01/28 15:44	テキストドキュメント																																										
SimpleViewerLauncher.exe	2018/09/17 19:31	アプリケーション																																										
vcruntime140.dll	2018/09/17 18:43	アプリケーション拡張																																										
<p>②</p>	<p>このように表示されると正常に開いています。</p>																																											