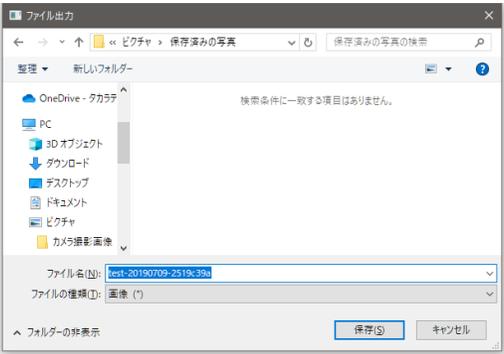
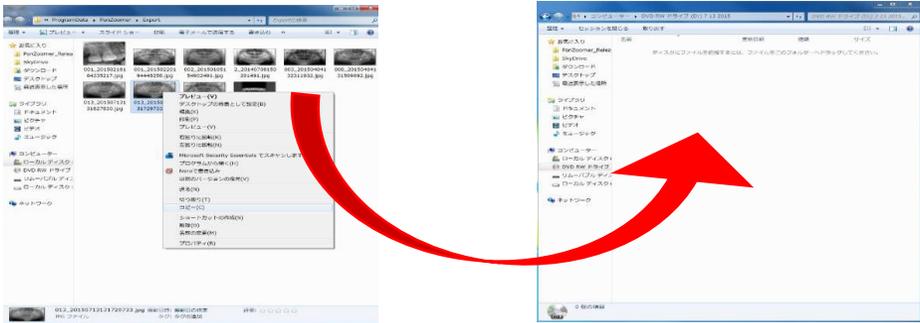


# BEL-X パノラマ・デンタル画像をUSBに保存したい

<p>①</p>	<p>出力したい画像を開き、ファイルの出力をクリックします。</p>	
<p>②</p>	<p>出力したい場所、ファイル名、ファイル形式を選択し、保存ボタンをクリックします。 ※ファイル形式にて「元の形式」を選択できますが、MyGate独自の形式です。</p>	
<p>③</p>	<p>USBをパソコンに挿し、USBのフォルダに出力した画像をドラッグ&amp;ドロップで移動させます。</p>	
<p>④</p>	<p>デスクトップ右下の  をクリックし、  をクリックします。 該当USBをクリックし、安全にUSBを取り出します。 本手順を踏まずUSBを抜くと、故障やデータ破損の原因になりますのでご注意ください。</p>	