

BEL-X 画像を違う患者さんに移したい、違う患者さんで撮影してしまった

①	画面右上の  をクリックし、メニューを表示します。	
②	「コンテンツ移動先患者の表示」をクリックすると、左右で患者検索画面が表示されます。	
③	間違っって撮影した（動かしたい）画像のある患者IDを上部検索入力し、患者さんをクリックで選択します。	
④	移し先の患者IDを下部検索にて入力します。	
⑤	移動したい画像を、移動先患者さんへドラッグ&ドロップします。 ※タブレットでタッチ操作を行う場合、画像を1秒以上長押しし、移動させてください。	