

製品安全情報

【デンタルライト ハロゲンランプ使用上のご注意】

平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

以下の内容をお読みいただき、正しくご使用ください。

- 1. ハロゲンランプ（消耗品）は、1年（※）を目安に交換をお願いします。**

定格寿命は1,100時間となっております。

定格寿命を大幅に超過してご使用されると、想定外の破損に繋がる恐れがありますので、定期的な交換をお願いいたします。

※1年は次の想定にて算出していますのでお客様のご使用状況により変動します。

1,100時間 ≒ 使用時間30分/人×使用者数10人/日×稼働日220日
- 2. ハロゲンランプは必ず、弊社が供給する専用のハロゲンランプをご使用ください。**

弊社が供給する専用のハロゲンランプ以外をご使用されますと、想定外の破損や早期のランプ切れの恐れがあります。

なお、専用のハロゲンランプ以外をご使用された場合は、機器の改造に該当する事から修理対応をお断りさせていただく場合があります。
- 3. ハロゲンランプを交換する際は、ガラス部分を素手で触らないでください。破損する恐れがあります。**

汚れた場合はアルコールなどを浸したきれいな布で拭きとってください。

素手で触れるなど、汚れが付着したまま使用すると、その部分だけ周囲と温度差が発生することで膨張率が変わり、ガラスが割れる原因となることがあります。

参考：専用ハロゲンランプ一覧

部品番号：1A0C4AA0

部品型番：JA-12V-55W

製品品番：DX-40*

製品名：オープンライト



部品番号：1A0C4CA0

部品型番：JA-12V-55WD/DL8

製品品番：DL-720*

製品名：ルシエライト



部品番号：1A0C4BA0

部品型番：JA-24V-60W

製品品番：DX-50**

DL-50**

製品名：105000

