

ルシエライト保守点検チェックリスト

「日常点検の手引き」に基づき、点検を行ってください

点検実施日		年 月 日 ()	点検実施者	
(free space)				
	点検内容	点検方法・診断	確認結果 異常有無	
1	ミラーカバーの状態確認	ミラーカバーに劣化や破損個所がないか、目視で確認のこと。	有	無
2	ミラーカバーの取り付け状態確認	ミラーカバーの爪部がハンドル根元に完全に収まり確実に取付いていること。	有	無
3	ミラーカバーストッパーのロック状態の確認	ミラーカバーストッパーが正しいロック状態にあることを目視で確認のこと。	有	無
4	ヨークジョイントカバーの状態確認	ヨークジョイントカバーが第2アームから飛び出していないこと。また、第2アームにネジ2本で確実に取り付けられていること。	有	無
5	アームゴムカバーの状態確認	アームゴムカバーが第2アームに確実に取付いていること。	有	無
6	ハロゲンランプ点灯確認	メインスイッチを 側に操作したあと、タッチレススイッチセンサーの表面から約 8 5 mm 以内で手の平を横切らせるとハロゲンランプが点灯し、再度手の平を横切らせると消灯すること。	有	無
7	照度切り替えスイッチ作動確認	ライトの点灯状態で、照度切り替えスイッチを押すことにより、照度が H I G H または L O W に切り替わること。また、H I G H 設定時、インジケーターがグリーン色に点灯し、L O W 設定時はオレンジ色に点灯すること。	有	無
8	タッチレススイッチセンサー作動確認	ライト点灯状態で、タッチレススイッチセンサーの表面から約 8 5 mm 以内で手の平を 2 秒間以上かざし続けると診療モードからレジンモードに切り替わり、いったん手を離してから再度 2 秒間以上かざし続けると、レジンモードから診療モードに切り替わること。また、レジンモードに切り替えると、インジケーターが点滅すること。	有	無
9	第2アームのスイングおよび停止確認	①上下スイング確認：第2アームを上下にスイングさせ、どの位置でも停止すること。 ②左右スイング確認：第2アームが流れないこと。	有	無
10	患者用ミラー取り付け状態確認	患者用ミラーがライトヘッド部に確実に取り付けられていること。	有	無
11	ライトヘッド回転および停止確認	ライトヘッドを上下にスイングさせ、どの位置でも停止すること。	有	無
12	脱着ハンドルの取り付け状態確認 【脱着ハンドル仕様オプション】	ソケット部のマークと、ハンドル部のマークが一致しており、ハンドルにガタツキなどがいないこと。	有	無
13	汚れ、薬品・薬剤の除去	汚れ、薬品・薬剤の付着の有無に関わらず、製品全体を清拭のこと。汚れがひどい場合は、水で 1 0 % 程度に薄めた中性洗剤を用いること。	未	済
14	その他①	可動可能部位を可動させた際、異音などの異常がないこと。	有	無
15	その他②	長時間使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常に且つ安全に作動することを確認すること。	有	無
特記事項：				

確認結果欄に異常「有」が一つでもある場合、「日常点検の手引き」（2 4 ～ 2 5 ページ）の点検結果・不合格時の処理欄に記載の方法にて処理が施されるまでは、製品を使用しないでください。