



ミラーカバーの取付・取外し方法

⚠ 注意

- ・ 交換の際には必ずメインスイッチを○位置にしてください。やけど、感電のおそれがあります。(メインスイッチはユニット側にあります)
- ・ 使用直後は、ハロゲンランプ、ランプホルダー、ミラーカバーなどが熱くなっています。冷めてから交換を行ってください。やけどのおそれがあります。



■ミラーカバーの取外し方法

- ①ミラーカバーを少し手前に引き
- ②ミラーカバーストッパーを上げる。
- ③ミラーカバーは反時計方向に回すと、外れます。

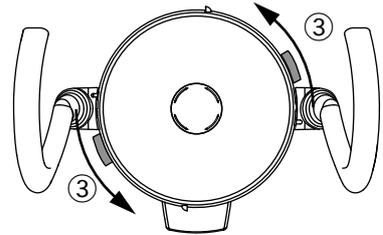
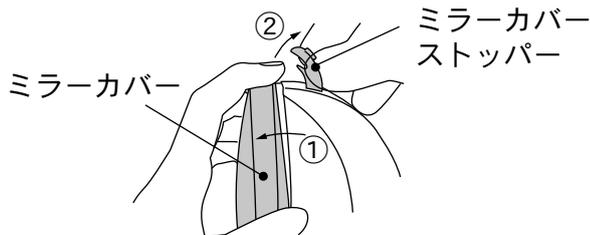


■ミラーカバーの取付方法


- ①ミラーカバーストッパーを上げたまま、ミラーカバーを時計方向に回します。
- ※ミラーカバーの爪部をハンドルの根元にある溝に最後まで入れます。

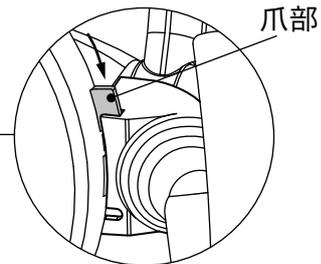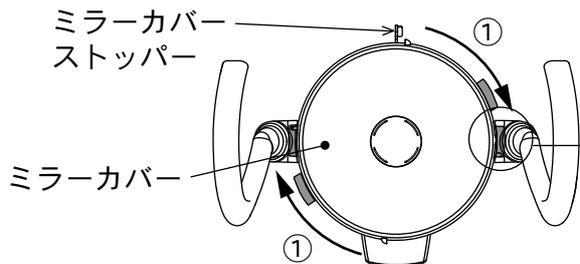

- ②ミラーカバーを少し手前に引きながら
 - ③ミラーカバーストッパーをおろします。
 - ④ミラーカバーを元に戻します。
- ※ミラーカバーストッパーの切り欠き部にミラーカバーがはまるようにしてください。

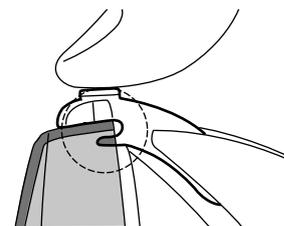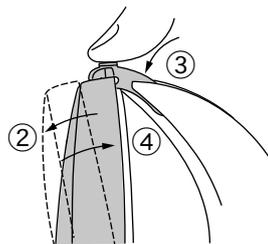

- ⑤取り付け状態を確認します。
- ※ミラーカバーの突起部が、正面向かってミラーカバーストッパーの右側にあることを確認してください。

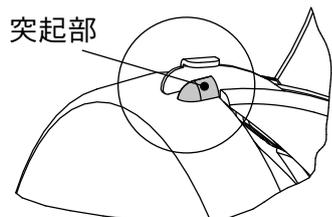

⚠ 警告

ミラーカバーが確実に取り付けられていることを確認してください。ミラーカバーが確実に取り付けられていないと、落下のおそれがあります。