

地震発生後の対応について

関係地域のお客様におかれましてはご不便なものと存じますが、当社製品をご使用されるにあたってのご注意を以下の通りご案内いたします。

安全確認のためにも使用される前に十分な点検をお願いします。

1. 機器の状態をご確認ください。

移動、転倒、ゆれ等がないか確認ください。

床固定ネジに緩みや、抜けがないかも確認下さい。

2. 異常な移動やゆれが確認された場合

① ユニット・チェア

転倒の危険があります。使用を中止してください。

給水や給気の接続が破断している可能性があります

また漏水等が発生する可能性があります、水道の元栓を閉じてください。

② CT、パノラレントゲン、デンタルレントゲン等

転倒の危険があります。可能であれば最下位まで装置を下げ、近づかない様に処置をして下さい。

③ その他機器（洗浄器等の給水・給湯・排水等が接続されている機器）

給水、給湯、排水等の接続状況に問題がないか、ご確認の上ご使用下さい。

3、安全確認のためにも点検実施後使用されることをお願いします。

ご使用される前に、取扱説明書の保守点検および始業前点検に従い点検を行い、少しでも異常を感じたら、使用せずに点検をご依頼下さい。

※本件に関するお問い合わせは、弊社営業所または下記までご連絡下さい。

タカラベルモント株式会社 デンタル営業部

大阪府中央区東心斎橋2-1-1

TEL:06-6212-3619 FAX:06-6212-3697

【修理・点検に関するお問合せ】

ベルモントコミュニケーション株式会社 コンタクトセンター

フリーダイヤル (0120) 194-222

(受付：月～金 9:00～18:00 / 土日祝 9:00～17:30)