

断水の復旧後対応について

断水復旧後は濁った水等が出てくることがあり、機器の水回路が詰まる原因となる場合があります。製品を安全かつ清潔にご使用頂くため以下の手順を実施して下さい。

1. 機器が移動、転倒、破損していないことを確認下さい。
異常が見られる場合にはご使用をお控え下さい。
2. 建屋の水道元栓を開いて下さい。(水道メーター付近の元栓)
3. 機器の周囲やシンクキャビネット内部から水漏れがないか確認してください。
異常が見られる場合には使用を控え、修理依頼を行って下さい。
4. 一般蛇口から水の濁りがなくなるまで吐水して下さい。
屋外の散水栓、単水栓（水のみ水栓）等から吐水してください。混合水栓やサーモ水栓、トイレ等から吐水すると水栓・機器の故障の原因となります。
5. ユニットの水抜き
 - ① 水漏れが無いことを確認した後、水メインバルブを開き、メインスイッチをON にしてください。水漏れがある場合は、使用を控え修理依頼を行なって下さい。
 - ② ボウル洗浄スイッチをON にし、ボウル洗浄の水を濁りが無くなるまで充分吐水してください
 - ③ フラッシュアウトを実施してください。
実施する際にはハンドピースホース（タービン、モーター、スケーラー）からハンドピースを外し、3WAY シリンジのノズルも外して下さい。

※本件に関するお問い合わせは、弊社営業所または下記までご連絡下さい。

タカラベルモント株式会社 デンタル営業部

大阪市中央区東心斎橋2-1-1

TEL:06-6212-3619 FAX:06-6212-3697

【修理・点検に関するお問い合わせ】

ベルモントコミュニケーション株式会社 コンタクトセンター

フリーダイヤル (0120) 194-222

(受付：月～金 9:00～18:00 / 土日祝 9:00～17:30)