

BELVITA

ベルヴィータ

販売名	一般的名称	認証・届出番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
ベルヴィータ	歯科用ユニット	230AFBZX00041000	管理	該当	該当	タカラベルモント株式会社
ベルヴィータカンターチェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001044	一般	該当	該当	タカラベルモント株式会社
ベルヴィータ前折れチェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001043	一般	該当	該当	タカラベルモント株式会社
ステラライトヴィータ	汎用歯科用照明器	27B1X00042002049	一般	非該当	非該当	タカラベルモント株式会社

**安全にお使いいただくために**

◎ご購入前に、設置場所・使用条件・用途をご確認ください。

◎ご使用の前に添付文書、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

・製品の仕様・デザイン・寸法は、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
・写真はカラー印刷のため実物の色とは多少異なる場合があります。
・実際の製品にはご使用上の注意ラベルが貼付されています。

 **株式会社** <https://www.takara-dental.jp>

〔大阪本社〕〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1
〔東京本社〕〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19



札幌 (011)863-2007	盛岡 (019)652-9744	仙台 (022)232-4480	郡山 (024)925-0742	新潟 (025)268-0333	さいたま (048)640-5900	千葉 (043)302-0267
東京 (03)3405-6877	横浜 (045)681-6241	名古屋 (052)932-6251	金沢 (076)221-8412	京都 (075)241-3425	大阪 (06)6212-3602	神戸 (078)231-6751
岡山 (086)233-8825	広島 (082)278-2411	高松 (087)862-3480	福岡 (092)411-2746	鹿児島 (099)226-9481	沖縄 (098)897-6656	

コンタクトセンター
TEL(0120)194-222 [フリーダイヤル]

※コンタクトセンターはタカラベルモント株式会社が修理および点検を委託するベルモントコミュニケーションズ株式会社の受付窓口です。

製造販売元

タカラベルモント株式会社 〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1



Global Standard Unit

BELVITA

ベルヴィータ

より美しく、健康的に生きるために

『VITA』とはラテン語で「生命」「活力」「人生」を意味します。
より美しく、健康的に生きるために。
BELVITAは人が本来持っている生きる力(活力)を
湧き出させるという願いを込めています。

"Fusion Shape"をテーマに、術者が求める形態・機能と、
患者さんにとっての快適性を追求しました。


次なる時代を感じさせる、グローバルスタンダードユニットを、
タカラベルモントが世界のドクターへお届けします。



BELVITA variation

カンターチェア

前折れチェア

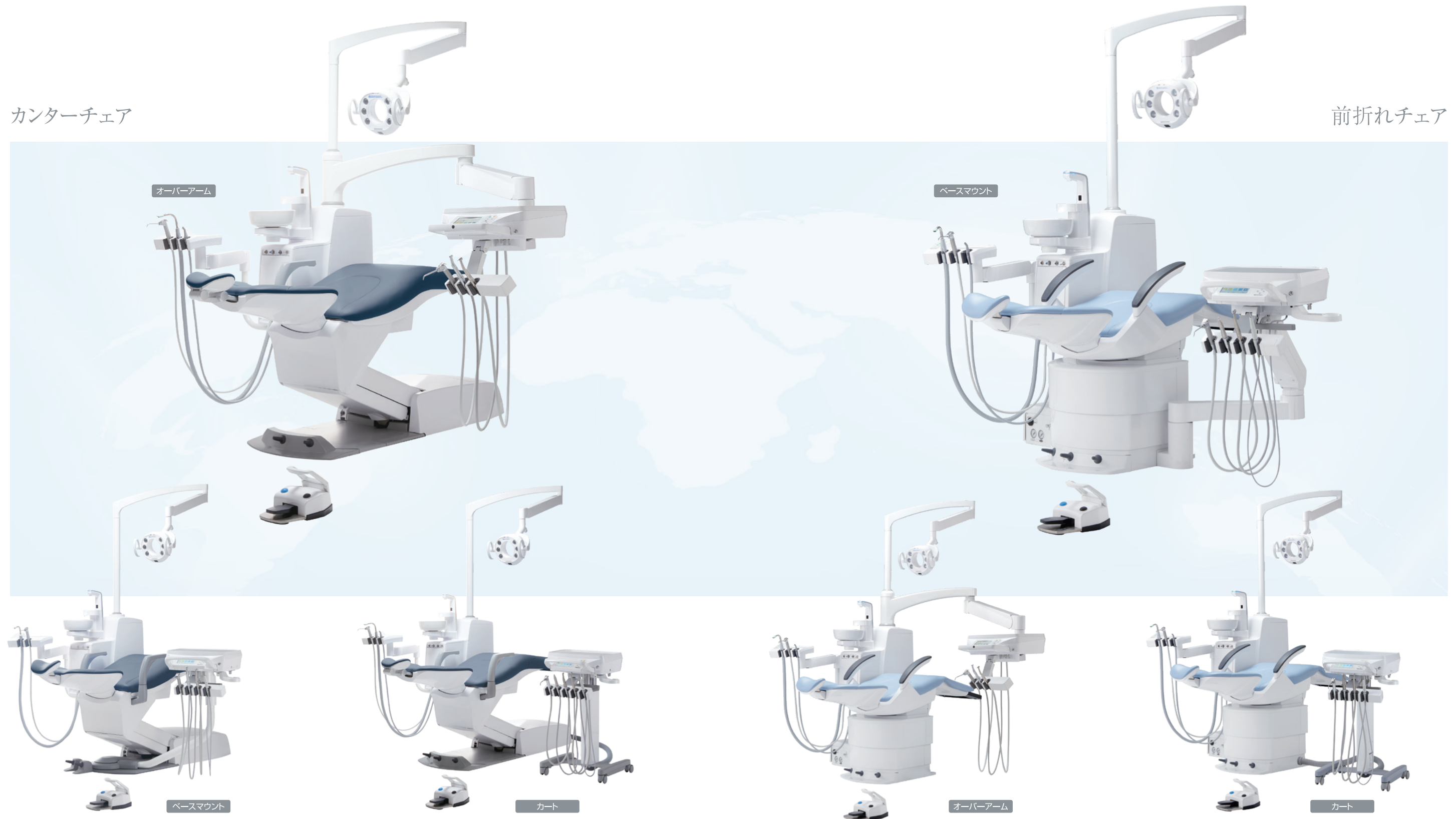

※写真はオプションを含みます。

Various styles ニーズに応じた診療スタイル

[2hands]



[2ハンド診療]

軽い動作と十分なリーチを持つアームが、効率的な2ハンド診療を可能にします。

[4hands]



[4ハンド診療]

大型テーブルトレイ(オプション)はドクターとアシスタントの共有スペースとして使用でき診療をスムーズにします。

[Pediatric]



[小児診療]

限られた診療スペースにて、大切なお子様に安心感を提供できるスタイルです。



ご家族の方が正面に向き合えることで、お子様の診療中の安心感が向上します。

[Rod]



[ロッド(立位)診療]


患者さんの姿勢に適したポジションを取ることができる効率的な診療スタイルです。



[ロッド(座位)診療]


様々な診療ポジションでも快適な位置にインスルメントをデリバリーできます。

[Microscope]

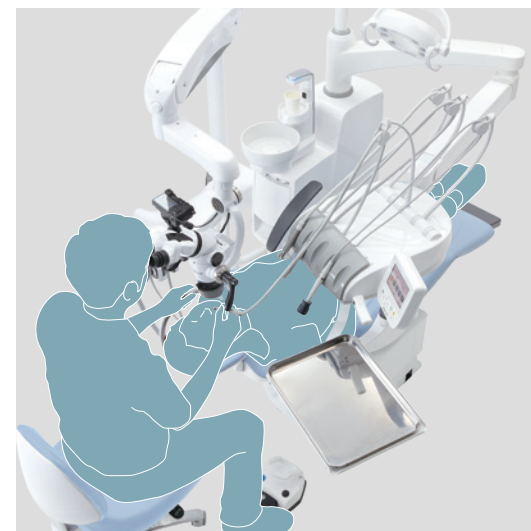

[マイクロスコブ診療]

集中力を切らさず、高度かつ精密な施術をおこなうことができる診療スタイルです。

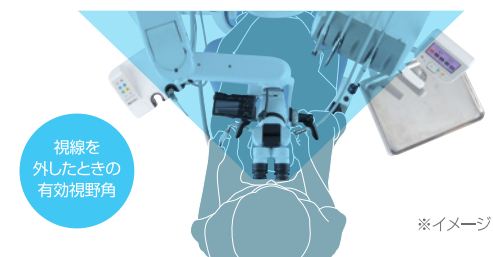

視線を
外したときの
有効視野角

※イメージ



※イメージ

施術中に顔の向きを変えずに、視線を鏡頭から外すだけでインスルメントデリバリーや各種設定の確認・操作がこなせます。

〔 Holder 〕 使いやすさへのこだわり

軽い力でフレキシブルに動くバランスアームと、1本ずつ独立したホルダー形状は、立位や座位といった幅広い診療ポジションにも容易に対応します。



タッチパネル操作に適したハンドル
テーブルデリバリーのしやすさと、
タッチパネルの操作性にも配慮した
ハンドル形状です。



フレキシブルホルダー
ホルダーの位置と角度を3軸で自由に
調整でき、任意の位置にホルダーを
配置できます。

〔 Place Holder 〕 スムーズなハンドピース操作



ホルダーに視線を移すこと
なくハンドピースを収めるこ
とができます。ハンドピース
が口腔方向に向くデザイン
がスムーズな治療をサポート
します。



ホースガイド
スムーズなガイドローラー動作でハンド
ピースホースの重さを軽減し、長時間の
治療でも疲れにくい設計になっています。

Select your Style

3つのホルダータイプからあなたのスタイルを

〔 Rod Holder 〕 軽やかにデリバリー

ハンドピースホースの重さをほとんど感じない、手首に優しいホースデリバリー。胸上配置ポジションに適しています。



ロングリーチ 900mmロングリーチにも対応することにより、胸上配置ポジションはもちろん幅広い施術スタイルに対応します。
※ロッドホルダーはオーバーアームのみの対応です。



フレキシブルな操作
術者の動きに追従するフレキシブル
な操作性を実現し、テーブルの向きに
対して角度のあるポジションでも、
快適に使用できます。



テンションアジャストメント
ロッド部の張力は装着するハンドピース
の重さに合わせて調整でき、手首に
掛かる負担を軽減します。



Smooth and Relax


快適性の追求

[Chair]

幅広い年齢層の患者さんに快適な時間をお過ごしいただけるバケット形状のチェアとなっています。
右アームレストは90°/135°回転し、患者さんの乗り降りをさらに優しくサポートします。(カンターチェアはオプション)



パワーヘッドレスト Option
ハンズフリーで衛生的に操作でき、インスツルメントを持ち直すストレスからも解放されます。

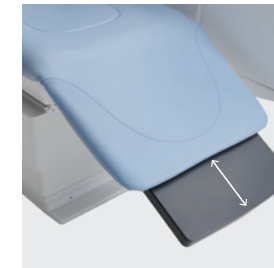

スライドフットレスト
スライドフットレストを採用。ステップが無いことで患者さんは座りやすく、また術者は6時方向からのアプローチが容易になります。



Touch your Style

ダイレクトな操作

[Interface]

タッチパネルを採用したディスプレイは、ユニット操作の視認性の向上を可能としました。チェア操作は診療の効率化を追求し、独立したスイッチにしました。

[ハンドピースの制御・設定]



マイクロモーター
マイクロモーターは、回転数、回転方向、ライトや注水のON/OFFなどの状態を一目で確認でき、設定変更もダイレクトにできます。メモリー機能は4通りまで設定可能です。




超音波スケーラー
超音波スケーラーは、モード、ライトや注水のON/OFFなどの状態を一目で確認でき、設定変更もダイレクトにできます。使用するチップに応じて、出力の上限設定がワンタッチでおこなえることで、効率的な診療をサポートします。

[ユーザー／患者メモリー]




患者さんの体形、診療内容に合わせてチェアの診療ポジションの設定状態を切り替えることができます。

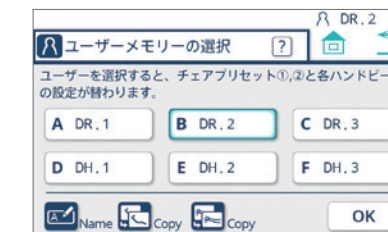

ユーザーごとにハンドピースとチェアの診療ポジションの設定状態を切り替えることができます。診療中の設定確認、調整の煩わしさから解放されます。

[衛生管理機能]

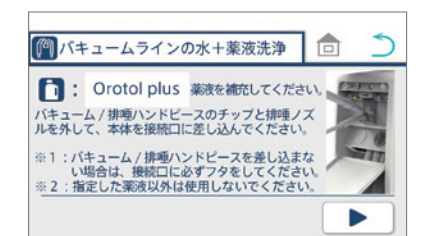

バキュームライン／排唾ラインの洗浄手順を優しくガイド。日々のお手入れを簡易かつ正確におこなえるやさしさを追求しました。



フラッシュアウト
患者さんごとのフラッシング、毎日の残留水除去をお手軽におこなえます。

Fit your Position

効率的なアシスタントワーク

[Assistant]

トレイによる作業スペースの確保、チェア操作やコップ給水操作が可能なスイッチを備えることで、効率的なアシスタントワークをサポートします。
根管長測定器、う蝕診断器などの診療機器を置けるスペースを確保しました。
(最大荷重1kgfまで)



アシスタントアーム(上下調整機構付き)
Option
170mmストロークで高さ調整可能なアームにより、2ハンド立位診療でも容易にハンドピースに手が届きます。



ツインバキューム対応 **Option**
大容量バキューム回路と、4本掛けまで対応できるホルダーにより、外科処置などに有用なツインバキュームにも対応。



通常モード



チェアロックモード



メンテナンスモード



ユニットの状態を光の色で知らせるインジケーター **Option**
光を使ってユニットの状態を伝えるインジケーターを搭載。コップ給水ノズルの一部が特定の色で発光することでユニットの状態をすばやく確認できます。



回転式スピットボウル
患者さんの近くまでボウルが回転し、水はねが少なくうがいができます。高級感がある陶器製のボウルを採用しています。

Provide Quality

安心と快適の共存

[Cuspidor]

Fusion Shape が織り成す柔らかいラインと、清潔さを感じさせる白を基調としたカラーリングで、患者さんの快適性にも配慮しました。

Brightly & Gently



“優しく”照らす

[Light]

5,000～34,000Luxで無段階で調光でき、高い演色性により自然な色を再現します。タッチレススイッチによりライトの点灯、消灯、レジジンモードの切替ができます。



フレキシブルなライト操作
長いアームと軽いヘッド操作により、様々なポジションからの照射も容易です。

Precise Control



微細なハンドピース コントロール

[Foot Control]

直感的な操作を可能としたフットペダル。フットコンキアリア、注水ON/OFF切替がコンパクトにまとめられています。オプションで置き場所の自由度が高いワイヤレスタイプもお選びいただけます。




フットペダル操作
横スライドと踏み込みにより、ハンドピースの出力調整を足元で細やかに操作できます。

Improvement of Cleanability

清掃性の追求 [Stay Clean] スタッフの方にとって、日常の清掃をおこないやすい優しさを追求しました。



レンズカバー着脱
レンズカバーはレバー操作で着脱でき、清掃性に配慮しています。

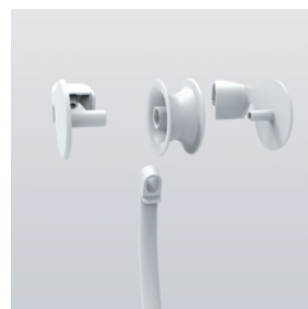

ロッドホルダー着脱
ロッドホルダー先端は簡単に分解清掃が可能となっています。



ホルダー着脱
ドクター、アシスタントのホルダースリーブは着脱清掃可能です。



ボウル着脱
陶器製のボウルと排水トラップは着脱可能です。常にクリーンな状態でお使いいただけます。

バキューム洗浄ユニット Option

バキュームライン／排唾ライン管路の除菌洗浄を自動化。診療後の作業を低減しつつ、信頼性の高いバキュームライン／排唾ライン洗浄がおこなえます。洗浄液の希釈から洗浄まで自動で行うことができ、スタッフの作業の省力化や効率化に繋がります。

従来のバキューム洗浄の流れ(参考)



バキューム洗浄ユニットの流れ



大幅な
省力化

1ヶ月(1台)で
約1.5時間
作業時間短縮

